

### **Si su médico solicita una RM:**

- ✓ Informe médico solicitante de que usted lleva el implante, un dispositivo de estimulación de la médula espinal.
- ✓ Busque su tarjeta de identificación de paciente. Si la ha perdido, llame al equipo de asistencia de Nevro HFX para solicitar una de repuesto.

### **Al concertar una cita para una RM:**

- ✓ Facilite la siguiente información al centro en el que vaya a concertar la cita de RM:
  - Indicación de que lleva un estimulador de la médula espinal Nevro HFX
  - Indicación de otros dispositivos médicos que pueda tener implantados
  - Descripción detallada de su dispositivo (p. ej., n.º de producto, cables y otros componentes del implante (dicha información puede encontrarla en su tarjeta de ID de paciente)
  - Datos de contacto del médico que le implantó el dispositivo
  - El Manual de directrices de Nevro para la RM (disponible en [Nevro.com/manuals](https://www.nevro.com/manuals))
- ✓ Su médico y el técnico de RM utilizarán dicha información para determinar si puede someterse de forma segura a una RM.

### **Cómo prepararse para la cita de RM:**

- ✓ Comuníquese con su equipo de atención de Nevro HFX para confirmar que puede programar de manera segura la exploración por resonancia magnética.
- ✓ Antes de la RM, el equipo de asistencia de Nevro HFX le ayudará a poner el dispositivo en modo RM desde la aplicación HFX.
  - Consulte la Guía Rápida de Inicio: Aplicación HFX para pacientes [NevroHFX.com/en/resources/hfx-app/](https://www.NevroHFX.com/en/resources/hfx-app/) si necesita instrucciones paso a paso.



**Asegúrese de que su dispositivo esté a plena carga antes de la RM.**

### En la cita de RM:

- ✓ Lleve su tarjeta de identificación de paciente a la cita para la RM.
- ✓ El técnico de RM confirmará si está usted en modo RM antes de someterse a la RM.

### Después de la cita de RM:

- ✓ Después de la RM, haga clic en «Salir de modo RM» y siga las indicaciones de la aplicación HFX para salir del modo RM y volver a activar la estimulación.
- ✓ Si utiliza el modo manual, contacte con el equipo de asistencia de Nevro HFX para asegurarse de que el dispositivo quede programado con los ajustes anteriores a la RM.



## ¿Necesita ayuda?

Contacte con su equipo para mas soporte con su implante HFX.



### Directrices sobre RM para el técnico de RM

Escanee el código para acceder a información detallada sobre compatibilidad con RM o visite [Nevro.com/manuals](https://www.nevro.com/manuals).

Nota: HFX y HFX iQ son aptos para RM en determinadas condiciones. Las condiciones autorizadas para la RM varían en función del modelo de dispositivo (o tipo de electrodo) implantado. Repase atentamente el Manual de directrices de Nevro para la RM con el equipo de asistencia de Nevro HFX antes de concertar una cita para RM.

© 2024 Nevro Corp. Todos los derechos reservados. SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, el logotipo de HF10, 10 kHz Therapy, HFX, el logotipo de HFX, HFX iQ, el logotipo de HFX iQ, HFX Algorithm, HFX CONNECT, el logotipo de HFX Connect, HFX ACCESS, el logotipo de HFX Access, HFX COACH, el logotipo de HFX Coach, HFX CLOUD, el logotipo de HFX Cloud, RELIEF MULTIPLIED, el logotipo de X, NEVRO y el logotipo de NEVRO son marcas comerciales o registradas de Nevro Corp.